

# AMERIGEL®



## INSTRUCCIONES

### Para El Cuidado De La Heridas



## AMERIGEL® HYDROGEL WOUND DRESSING

### QUITAR EL VENDAJE

Retire con cuidado el apósito / gasa existente que cubre la herida. Para que el apósito sea más fácil de quitar con poca o ninguna molestia, humedezca con AMERIGEL Saline Wound Wash. Espere varios minutos y luego retírelo con cuidado.

### LIMPIEZA DE LA HERIDA

Rocíe AMERIGEL Saline Wound Wash sobre la herida para limpiar. La acción presurizada de AMERIGEL Saline Wound Wash solo requiere una pequeña cantidad de aerosol para limpiar la herida. Para controlar el flujo, presione la boquilla hacia abajo y suéltela rápidamente. Seque suavemente la herida. La herida ya está lista para la aplicación de AMERIGEL Hydrogel Wound Dressing.

### APLICACIÓN DEL APÓSITO PARA HERIDAS AMERIGEL HYDROGEL

Después de limpiar la herida, aplique una capa fina AMERIGEL Hydrogel Wound Dressing en la herida y la piel circundante, extendiéndose al menos ¼ de pulgada más allá del borde de la herida.

### TAPAR LA HERIDA

Después de la aplicación del AMERIGEL Hydrogel Wound Dressing, coloque un trozo de gasa seca sobre la herida

para absorber cualquier drenaje. Asegure la gasa en su lugar con cinta o gasa enrollada.

### PUEDE OCURRIR PICADURA

Algunos pacientes informan de una sensación de "escozor" o "ardor", similar a la del peróxido de hidrógeno, cuando se aplican inicialmente el AMERIGEL Hydrogel Wound Dressing. Esto es temporal y normal.

### CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS

1. Cambie el apósito dos veces al día durante la primera semana y una vez al día a partir de entonces.
2. Si la gasa se pega a la herida, saturarla con AMERIGEL Saline Wound Wash hasta que se desprenda sin tirar de la herida.
3. Puede producirse un mayor drenaje y la herida puede parecer más profunda con las primeras aplicaciones. Esta es una buena señal siempre que ambos ocurran juntos. Las heridas generalmente se curan de adentro hacia afuera, volviéndose menos profundas, lo que permite que la piel circundante se cierre sobre la herida.

**PARA CUALQUIER PREGUNTA O INQUIETUD,  
CONTACTE A SU MÉDICO**

**Su próxima visita programada:**

**Fecha:** \_\_\_\_\_

**Hora:** \_\_\_\_\_ **AM / PM**

### Atención:

*Coloque la tarjeta de presentación aquí  
antes de hacer copias.*