



INSTRUCCIONES

Para el AMERX® Kit del Cuidado de Heridas



HELIX3-CM® COLLAGEN MATRIX

RETIRANDO EL VENDAJE

Retire con cuidado el vendaje / gasa existente que cubre la herida. Para hacer que el vendaje sea más fácil de quitar con poca o ninguna molestia, puede humedecer el vendaje con AMERIGEL® Saline Wound Wash. Espere varios minutos y luego remuevalo con cuidado. Si el HELIX3-CM Collagen Matrix permanece adherido a la herida, NO intente retirar ni alterar la base de la herida.

PASO 1: LIMPIEZA DE LA HERIDA

Limpie la herida con AMERIGEL Saline Wound Wash rociando el área afectada. El lavado de heridas con presión requiere solo una pequeña cantidad del aerosol para limpiar la herida. Seque suavemente la herida.

PASO 2: APLICACIÓN DE AMERX HELIX3-CM COLLAGEN MATRIX

Después de la limpieza de la herida, cubra la herida con HELIX3-CM Collagen Matrix. Si el apósito se extiende más allá de la superficie de la herida, puede cortar HELIX3-CM para que se ajuste al tamaño de la herida o doblar cualquier parte superpuesta para que encaje dentro del borde de la herida.



PASO 3: APLICACIÓN AMERX BORDERED GAUZE DRESSING

Retire el apósito de AMERX Bordered Gauze del paquete. Retire un lado del papel. Coloque el vendaje sobre la herida y la piel circundante. Retire el papel restante. Suavemente alise el borde del vendaje para asegurar el contacto adecuado con la piel circundante.

CAMBIE EL APÓSITO DIARIAMENTE O COMO LO INDICA SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA.

ADVERTENCIAS:

- Debido al riesgo de infección por pérdida de esterilidad, deseche cualquier producto restante después de la aplicación inicial.
- NO use HELIX3-CM si es alérgico o sensible a los materiales de origen bovino.
- Suspenda el uso de HELIX3-CM y notifique a su médico si se produce enrojecimiento, dolor, hinchazón o formación de ampollas en exceso.

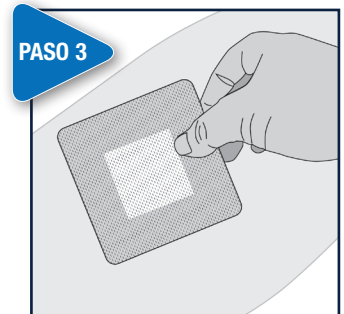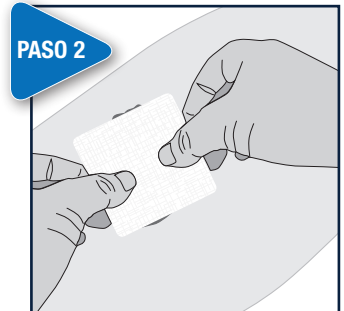

**PARA CUALQUIER PREGUNTA O DUDA,
FAVOR DE COMUNICARSE CON SU MÉDICO**

Su próxima visita de seguimiento es en:

Fecha: _____

Hora: _____ AM/PM

Atención:

Por favor, coloque la tarjeta de visita aquí antes de hacer copias.