



# INSTRUCCIONES

Para el AMERX<sup>®</sup> Kit del Cuidado de Heridas



## AMERIGEL<sup>®</sup> HYDROGEL WOUND DRESSING

### RETIRANDO EL VENDAJE

Retire con cuidado el vendaje / gasa existente que cubre la herida. Para hacer que el vendaje sea más fácil de quitar con poca o ninguna molestia, puede humedecer el vendaje con AMERIGEL Saline Wound Wash. Espere varios minutos y luego remuevalo con cuidado.

### PASO 1: LIMPIEZA DE LA HERIDA

Limpie la herida con AMERIGEL Saline Wound Wash rociando el área afectada. El lavado de heridas con presión requiere solo una pequeña cantidad del aerosol para limpiar la herida. Seque suavemente la herida.



### PASO 2: APLICACIÓN DE AMERIGEL HYDROGEL WOUND DRESSING

Después de la limpieza de la herida, aplique una capa delgada de AMERIGEL Hydrogel Wound Dressing sobre la herida y sus alrededores, extendiéndose aproximadamente ½ pulgada más allá del borde de la herida.

### PASO 3: APLICACIÓN AMERX BORDERED GAUZE DRESSING

Retire el apósito de AMERX Bordered Gauze del paquete. Retire un lado del papel. Coloque el vendaje sobre la herida y la piel circundante. Retire el papel restante. Suavemente alise el borde del vendaje para asegurar el contacto adecuado con la piel circundante.

**CAMBIE EL APÓSITO DIARIAMENTE O COMO LO INDICA SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA.**

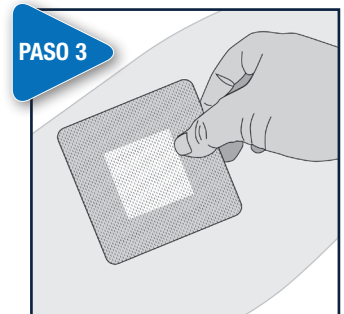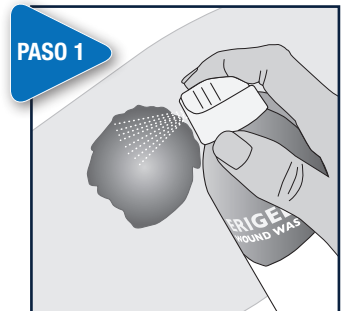

**PARA CUALQUIER PREGUNTA O DUDA,  
FAVOR DE COMUNICARSE CON SU MÉDICO**

*Atención:  
Por favor, coloque la tarjeta de visita  
aquí antes de hacer copias.*

Su próxima visita de seguimiento es en:

Fecha: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_ AM/PM